

Ortho®Patienteninformation zu Stabilschuhen

Was sind Künzli Ortho® Schuhe?

Stabilschuhe

Künzli Ortho® Schuhe sind orthopädische Therapieschuhe (Medizinprodukt Klasse I) zur Stabilisierung des Sprunggelenks. Sie werden ärztlich verordnet bei:

- Bänderrissen und Sprunggelenksverletzungen
- Chronischer Bandinstabilität
- Postoperativer Versorgung (Frakturen, Bandrekonstruktionen, Gelenkoperationen)
- Spastischer und schlaffer Lähmung
- Angeborenen Fehlstellungen des Fusses

Verwenden Sie den Schuh ausschliesslich gemäss ärztlicher Verordnung. Behandeln Sie Schmerzen oder Verletzungen nicht eigenständig damit.



Wichtige Hinweise vor dem Gebrauch?

Entfernen Sie die Stabilisierungselemente im Schaft nie ohne ärztliche Anweisung. Wann und ob dies möglich ist, entscheidet Ihr Arzt oder Orthopädiefachperson. Sofern nicht anders verordnet, tragen Sie die Schuhe beidseitig. Tragedauer und Anwendungsbereich legt Ihr Arzt fest.

Nächtliches Tragen

Künzli Ortho® Schuhe können in der Regel nachts ausgezogen werden. Ob dies in Ihrem Fall möglich ist, entscheidet Ihr Arzt. Bei Bedarf kann alternativ eine Nachtbandage (Ortho Nacht) verordnet werden.



Anziehen

1. Schnürung oder Klettverschlüsse vollständig öffnen, Lasche nach vorne klappen.
2. Geeignete Socken oder Kompressionsstrümpfe anziehen.
3. Im Sitzen in den Schuh schlüpfen, Ferse nach hinten schieben, Lasche zentrieren.
4. Schuh fest, aber nicht zu eng schliessen, um Druckstellen zu vermeiden.
5. Beim Aufstehen an einer festen Stütze festhalten.

Ihr Arzt oder Ihre Orthopädiefachperson zeigt Ihnen die für Ihren Heilungsverlauf richtige Fussbewegung beim Anziehen.

Mögliche Nebenwirkungen

In seltenen Fällen können auftreten:

- Druckstellen oder Schmerzen am Knöchel durch die Stabilisierungselemente
- Rötungen, Schwellungen oder Hautirritation

Kontrollieren Sie Ihre Füsse täglich. Bei Beschwerden wenden Sie sich umgehend an Ihre Orthopädiefachperson.

Hinweis zu echtem Leder

Künzli Schuhe werden aus hochwertigem Qualitätsleder hergestellt. Leder ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Struktur und Narbenbild sind keine Mängel. Bei intensiven Farben kann anfängliches Abfärben auftreten, das sich in der Regel aus Socken auswaschen lässt.

Bezug und Reparatur

Erhältlich auf ärztliche Verordnung von Ärzten, Spitälern bei Orthopädienschuhmachern und Orthopädietechnikern. Bei Garantiefragen oder Reparaturen wenden Sie sich an Ihre Abgabestelle.

Pflegeanweisung

Reinigen

Mit Bürste oder feuchtem Tuch reinigen. Nicht in der Waschmaschine waschen. Sohle von Steinen und Schmutz befreien.

Trocknen

Mit Zeitungspapier ausstopfen, bei Zimmertemperatur an der Luft trocknen. Keine direkte Wärmequelle verwenden.

Pflege & Imprägnieren

Glattleder regelmässig wachsen oder cremen. Nubukleder mit Spezialbürste pflegen. Regelmässig imprägnieren..

Lagerung

Trocken in Schuhkarton oder Stoffbeutel, mit Schuhspanner.

