

Ortho® Informations pour les patients sur les chaussures orthopédiques

Que sont les chaussures Künzli Ortho® ? Chaussures orthopédiques

Les chaussures Künzli Ortho® sont des chaussures orthopédiques thérapeutiques (dispositif médical de classe I) destinées à stabiliser la cheville. Elles sont prescrites par un médecin dans les cas suivants:

- Ruptures ligamentaires et blessures de la cheville
- Instabilité ligamentaire chronique
- Prise en charge postopératoire (fractures, reconstructions ligamentaires, interventions chirurgicales articulaires)
- Paralysie spastique et flasque
- Malformations congénitales du pied

Tous les adultes et adolescents doivent utiliser la chaussure exclusivement conformément à la prescription médicale. Ne traitez pas vous-même les douleurs ou les blessures. Utilisation dans le cadre sportif uniquement à titre préventif.



Consignes importantes avant utilisation?

Ne retirez jamais les éléments de stabilisation situés dans la tige sans l'avis d'un médecin. C'est votre médecin ou votre orthopédiste qui décidera si cela est possible et à quel moment. Sauf indication contraire, portez les chaussures aux deux pieds. La durée de port et le domaine d'utilisation sont déterminés par votre médecin.

Port pendant la nuit

En règle générale, les chaussures Künzli Ortho® peuvent être retirées la nuit. C'est votre médecin qui déterminera si cela est possible dans votre cas. Si nécessaire, un bandage de nuit (Ortho Nuit) peut être prescrit à la place.



Enfilage

1. Desserrer complètement les lacets ou les fermetures velcro, rabattre la languette vers l'avant.
2. Enfiler des chaussettes adaptées ou des bas de contention. En position assise, glissez le pied dans la chaussure, poussez le talon vers l'arrière, centrez la languette.
3. Fermez la chaussure fermement, mais sans trop serrer, afin d'éviter les points de pression. En vous levant, tenez-vous à un appui solide.

Votre médecin ou votre orthopédiste vous montrera le mouvement du pied adapté à votre processus de guérison lors de l'enfilage.

Effets secondaires possibles

Dans de rares cas, les symptômes suivants peuvent apparaître :

- Points de pression ou douleurs au niveau de la cheville dus aux éléments de stabilisation
- Rougeurs, gonflements ou irritations cutanées

Inspectez vos pieds quotidiennement. En cas de gêne, consultez immédiatement votre orthopédiste.

Contre-indications

- Plaies ouvertes non soignées, lésions cutanées au niveau de la cheville ou du pied.
- Inflammations ou infections aiguës du pied ou de la cheville (par exemple, érysipèle, ostéomyélite).
- Troubles circulatoires graves (par exemple, insuffisance veino-artérielle sévère de grade III-IV, diabète), dans la mesure où une pression compressive est contre-indiquée.
- Hypersensibilité à l'un des matériaux utilisés (cuir, matières textiles) Le produit ne doit être utilisé que s'il est correctement ajusté et de la bonne taille. L'ajustement doit être effectué par du personnel qualifié
- Absence de prescription : le produit ne doit pas être utilisé sans prescription médicale.

Achat et réparation

Disponible sur ordonnance médicale délivrée par des médecins ou des hôpitaux, auprès des cordonniers orthopédiques et des techniciens orthopédistes. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, veuillez vous adresser à votre point de vente.

Conseils d'entretien

Nettoyage

Nettoyer à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon humide. Ne pas laver en machine. Enlever les cailloux et les salissures de la semelle.

Séchage

Remplir les chaussures de papier journal et les laisser sécher à l'air libre à température ambiante. Ne pas les exposer à une source de chaleur directe..

Entretien et imperméabilisation

Cirer ou appliquer régulièrement une crème sur le cuir lisse. Entretenir le cuir nubuck à l'aide d'une brosse spéciale. Imperméabiliser régulièrement.

Rangement

Conservé au sec dans une boîte à chaussures ou un sac en tissu, avec des embauchoirs.



Remarque concernant le cuir véritable

Le cuir de haute qualité est un produit naturel. Les variations de couleur, de structure et de grain sont naturelles. Les couleurs intenses peuvent présenter un risque de déteinture au début.

D'information destinée aux patients concernant les chaussures Künzli Ortho® Conformément au règlement MDR (UE 2017/745), annexe I, chapitre 23. Date de création : 20 février 2011 | Date de révision : 1er juin 2026