

Ortho® Informazioni per i pazienti sulle scarpe ortopediche

Cosa sono le scarpe Künzli Ortho®? Scarpe ortopediche

Le scarpe Künzli Ortho® sono scarpe ortopediche terapeutiche (dispositivo medico di classe I) destinate alla stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. Vengono prescritte dal medico nei seguenti casi:

- Rotture dei legamenti e lesioni dell'articolazione tibio-tarsica
- Instabilità cronica dei legamenti
- Trattamento postoperatorio (fratture, ricostruzioni legamentose, interventi chirurgici alle articolazioni)
- Paralisi spastica e flaccida
- Malformazioni congenite del piede

Tutti gli adulti e gli adolescenti devono utilizzare la scarpa esclusivamente secondo le indicazioni del medico. Non trattare autonomamente dolori o lesioni. L'uso durante l'attività sportiva è consentito solo a scopo preventivo.



Avvertenze importanti prima dell'uso?

Non rimuovere mai gli elementi di stabilizzazione presenti nella tomaia senza le indicazioni del medico. Sarà il medico o il tecnico ortopedico a decidere se e quando ciò sia possibile. Salvo diversa prescrizione, indossare le scarpe su entrambi i piedi. La durata di utilizzo e le indicazioni d'uso saranno stabilite dal medico.

Indossarlo di notte

Di norma, le scarpe Künzli Ortho® possono essere tolte durante la notte. Sarà il medico a decidere se ciò sia possibile nel vostro caso specifico. Se necessario, in alternativa può essere prescritto un bendaggio notturno (Ortho Notte).



Vestirsi

1. Allentare completamente i lacci o le chiusure in velcro, ribaltare la linguetta in avanti.
2. Indossare calzini adeguati o calze a compressione.
3. Mettersi la scarpa da seduti, spingere il tallone all'indietro, centrare la linguetta.
4. Allacciare la scarpa in modo saldo, ma non troppo stretto, per evitare punti di pressione.
5. Quando ci si alza, aggrapparsi a un appoggio stabile.

Il medico o il tecnico ortopedico vi mostrerà il movimento corretto del piede da eseguire durante la calzatura, in base al vostro processo di guarigione..

Possibili effetti collaterali

In rari casi possono verificarsi:

- Punti di pressione o dolore alla caviglia causati dagli elementi di stabilizzazione
- Arrossamenti, gonfiori o irritazioni cutanee

Controllate i vostri piedi ogni giorno. In caso di disturbi, rivolgetevi immediatamente al vostro ortopedico.

Controindicazioni

- Ferite aperte non trattate, lesioni cutanee nella zona della caviglia o del piede.
- Infiammazioni o infezioni acute del piede o della caviglia (ad es. erisipela, osteomielite).
- Gravi disturbi circolatori (ad es. insufficienza venosa cronica grave di grado III-IV, diabete), qualora la pressione compressiva sia controindicata.
- Ipersensibilità a uno dei materiali utilizzati (pelle, tessuti)
Il prodotto deve essere utilizzato solo se la vestibilità e la taglia sono corrette. L'adattamento deve essere effettuato da personale qualificato.
- Mancanza di prescrizione medica: il prodotto non deve essere utilizzato senza prescrizione medica.

Acquisto e riparazione

Disponibile su prescrizione medica rilasciata da medici o ospedali, presso calzolai ortopedici e tecnici ortopedici. Per domande relative alla garanzia o alle riparazioni, rivolgersi al proprio punto di vendita.

Istruzioni per la cura

Pulizia

Pulire con una spazzola o un panno umido. Non lavare in lavatrice. Rimuovere sassolini e sporco dalla suola.

Asciugatura

Imbottire con carta di giornale e lasciare asciugare all'aria a temperatura ambiente. Non esporre a fonti di calore dirette..

Cura e impermeabilizzazione

Lucidare o applicare regolarmente una crema sulla pelle liscia. Curare la pelle nabuk con una spazzola speciale. Impermeabilizzare regolarmente.

Custodire

Custodire in un luogo asciutto, in una scatola da scarpe o in un sacchetto di stoffa, con tendiscarpe.



Nota sulla pelle vera

Nota sulla pelle vera

La pelle di alta qualità è un prodotto naturale. Eventuali variazioni di colore, struttura e venatura sono naturali. Nei colori intensi può verificarsi inizialmente un leggero scolorimento.