

Ortho®Keilversorgung zu Achillessehnen Schuhe

Versorgungskonzept Achillesschuhe


Achillessehne

Ortho Rehab Absolut rechts & links
Ortho Rehab Total & Total Max



Schuhgrösse (in ganzen Grössen UK)

Schuhgrösse		Dicker Keil	Dünner Keil
UK 3 - 6	Höhe	20 mm	10 mm
EU 35-39	Länge	160 mm	170 mm
UK 7 - 10	Höhe	25 mm	15 mm
EU 40 1/2 - 44 1/2	Länge	180 mm	190 mm
UK 11 -15	Höhe	25 mm	15 mm
EU 45 2/3 - 51	Länge	190 mm	200mm

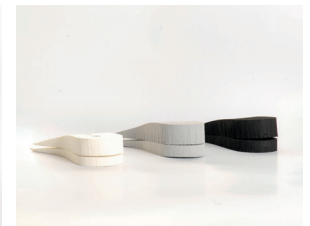

Versorgungskonzept Achillesschuhe

Achillessehne

Jedes Paar Achillesschuhe wird mit einem auf die Schuhgrösse abgestimmten Paar Keilen geliefert. Sie ermöglichen eine individuell einstellbare Spitzfussstellung. Ein zentraler Faktor für den Heilungsverlauf nach Achillessehnenverletzungen.

Die Keilversorgung erfolgt in mehreren Phasen, abgestimmt auf den Heilungsverlauf (siehe Abbildungen). Schuhe und Keile werden stets beidseitig getragen, um ein symmetrisches Gangbild sowie eine korrekte Becken- und Wirbelsäulenhaltung zu unterstützen.

In der ersten Phase wird je nach Therapiekonzept ein Softcast im Schuh getragen. Dieser dient über den gesamten Heilungszeitraum hinweg auch als Nachtschiene für eine kontinuierliche Ruhigstellung und Schutzfunktion.



Phase 1
Decksohle + drei Keile



Phase 2
Decksohle + zwei Keile



Phase 3
Decksohle + ein Keil



Phase 4
nur Decksohle